

## (ES) Protector torácico Ecoprim compresión continua

### Descripción y uso previsto:

Módulo: Ortesis tipo chaleco que comprime e inmoviliza el pecho. Realizada en material transpirable en la espalda, con cinchas regulables y doble lateral elástico que permite la respiración normal y comprimir a la vez que se mantiene el confort. Amortigua el impacto al incorporarse o toser, aportando al paciente protección y sujeción. Fácil ajuste y colocación gracias al cierre mediante hebillas de click. Piezas laterales recortables para adaptarse a todos los pacientes. Almohadillas protectoras extraíbles y lavables.

### Indicaciones:

Post-Operatorio de cirugía cardíaca y torácica. Inmovilización esternal. Puede ser utilizada en la UVI.

### Contraindicaciones:

- No usar en cicatrices abiertas.
- No usar si la zona donde se coloca la órtesis está infectada.
- No usar en caso de alergias cutáneas por contacto con los materiales biocompatibles.
- Dejar de utilizar si la zona comienza a enrojecerse y/o acumula excesivo calor.
- Contraindicado usar sin camiseta.

### Precauciones:

- Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de utilizar la ortesis. Si tiene alguna duda, consulte a su médico o al establecimiento donde lo haya adquirido.
- Para que la ortesis pueda ejercer su función, se debe utilizar el producto de la talla adecuada a la medida del paciente. Si el paciente se encuentra cerca del rango máximo de una talla y presenta abdomen prominente elegir la talla inmediatamente superior.
- Respete siempre las instrucciones de uso generales y las indicaciones particulares que haya prescrito el facultativo.
- El médico es la persona capacitada para prescribir y decidir la duración del tratamiento, así como su seguimiento.
- Si se nota algún efecto secundario, afección cutánea o sensibilización se ha de poner inmediatamente en conocimiento del médico. Suspenda su utilización hasta ser valorado por el especialista.
- El facultativo deberá tener en cuenta el posible uso de cremas de uso tópico, junto con el empleo de la ortesis.
- En las zonas de presión, la piel no debe estar lesionada ni ser hipersensible.
- Aunque la ortesis no es de un solo uso, es para un único paciente. No reutilizar en otros pacientes.
- La primera colocación y adaptación de estos accesorios debe realizarse por personal cualificado (médico, técnico ortopédico, etc.).
- El buen uso de las ortesis depende del estado de los elementos que la forman por lo que ha de ser supervisada con periodicidad. El personal sanitario que realice el seguimiento del tratamiento del paciente puede indicar al mismo la idoneidad del producto o la conveniencia de su sustitución, si el producto se ha deteriorado o desgastado.
- Se aconseja cuidar la limpieza de los cierres rápidos de microgancho para conservar su funcionalidad, eliminando los materiales que pudieran haber quedado adheridos al mismo.
- El producto no es ignífugo, por lo que se recomienda no utilizarlo en ambientes con excesivo calor, fuego o radiaciones.
- Limpiar periódicamente el producto y mantener una correcta higiene personal.
- Consultar a su médico si puede retirarse la ortesis durante el baño o ducha, en caso contrario, cubra o proteja la ortesis del agua.
- No permita que los niños jueguen con este dispositivo.

**Nota:** Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario y/o paciente.

## Instrucciones uso y colocación:

### *ECOPRIM COMPRESION CONTINUA UNISEX*

- 1.- Elegir el modelo de Ecoprim más adecuado para el paciente.
- 2.- Colocar centrado en la espalda y cerrar las hebillas de los tirantes, deslizando hacia arriba la pieza protectora. El producto debe colocarse de forma que no cause molestia bajo la axila. Fig 1 y 2
- 3.- Introducir las cinchas laterales en los pasadores laterales. Fig 3
- 4.- Ajustar primero las cinchas laterales inferiores tirando de manera simétrica para que quede ajustado bajo el pecho Fig 4
- 5.- Ajustar las dos cinchas laterales superiores tirando de manera simétrica para que quede ajustado sobre el pecho en caso del modelo Ecoprim continuo y por encima del pecho en caso en el caso del modelo Ecoprim continuo de mujer. Fig 5
- 6.- Confirmar con el paciente que siente compresión sobre los costados, manteniendo un soporte constante sobre el tórax que proporcionará seguridad y comodidad al paciente.
- 7.- Por último, en función del cuerpo de cada paciente se puede recortar la longitud de los tirantes. Para ello, retirar los cierres de velcro y volverlos a colocar después de recortar a la medida necesaria.
- 8.- En el modelo Ecoprim continuo deben quedar dos almohadillas sobre el pecho, quedando la cicatriz centrada entre las almohadillas. Fig 6

### *ECOPRIM COMPRESION CONTINUA MUJER*

- 1.- Elegir el modelo de Ecoprim más adecuado para el paciente.
- 2.- Colocar centrado en la espalda Fig 7 y cerrar las hebillas de los tirantes, deslizando hacia arriba la pieza protectora. El producto debe colocarse de forma que no cause molestia bajo la axila.
- 3.- Cerrar las hebillas delanteras. Fig 8
- 4.- Ajustar en primer lugar las cinchas inferiores tirando de manera simétrica para que quede ajustado bajo el pecho Fig 9
- 5.- Ajustar las dos cinchas superiores tirando de manera simétrica para que quede ajustado sobre el tórax, dejando libre la zona del pecho para evitar molestias. Fig 10
- 6.- Confirmar con el paciente que siente compresión sobre los costados, manteniendo un soporte constante sobre el tórax que proporcionará seguridad y comodidad. Fig 11
- 7.- Por último, en función del cuerpo de cada paciente se puede recortar la longitud de los tirantes. Para ello, retirar los cierres de velcro y volverlos a colocar después de recortar a la medida necesaria.



### Colocación por parte del paciente:



Una vez ajustada la ortesis no debe volver a manipularse la regulación de los cierres. El paciente únicamente debe abrir la ortesis usando las hebillas de cierre click que se encuentran sobre el pecho, aplicando presión en la parte de arriba y debajo de la hebilla; y también las hebillas de los tirantes, aplicando presión en la parte central de la hebilla.

### Mantenimiento del producto - Instrucciones de lavado:

Antes de lavar deben quedar todos los microganchos cerrados. Lavar a máquina a una temperatura máxima de 40 °C y jabón neutro. No usar lejía. No secar en secadora. No planchar. No lavar en seco. No exponer a fuentes de calor directas como estufas, calefacciones, radiadores, exposición directa al sol, etc.



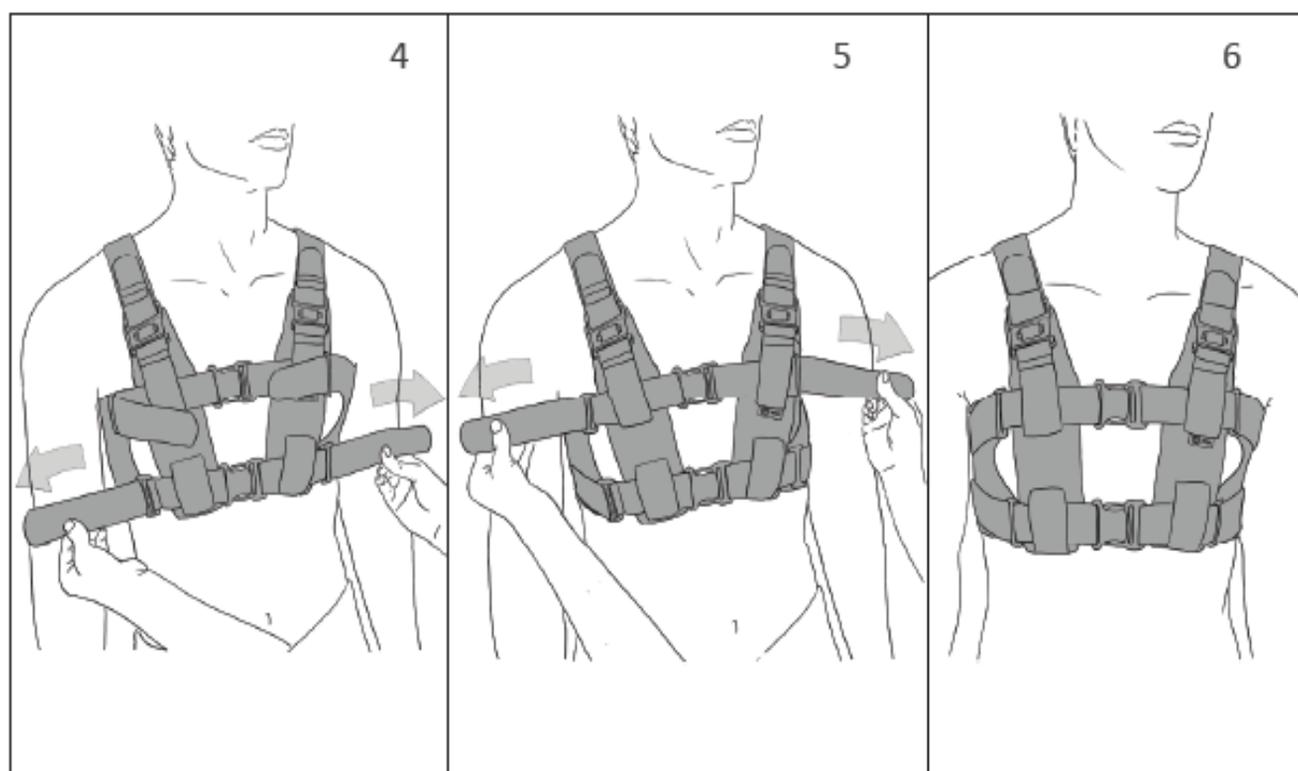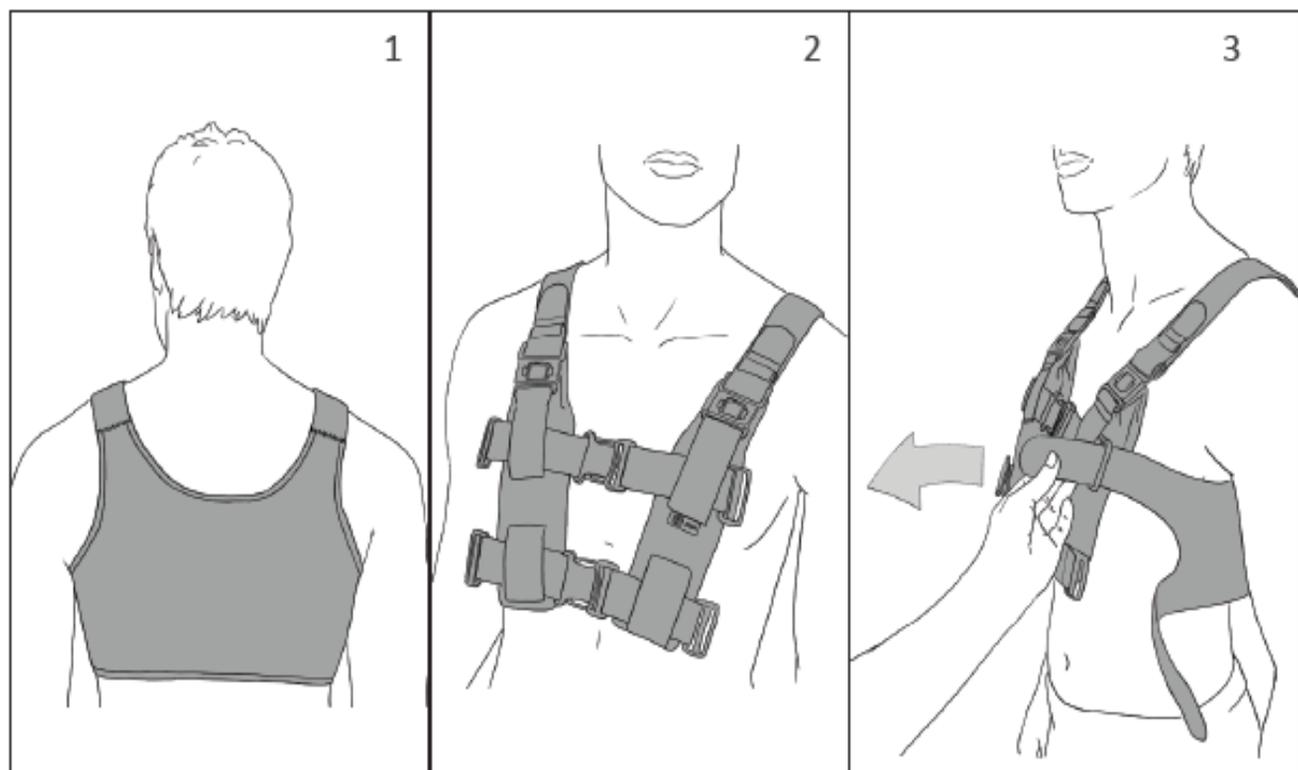

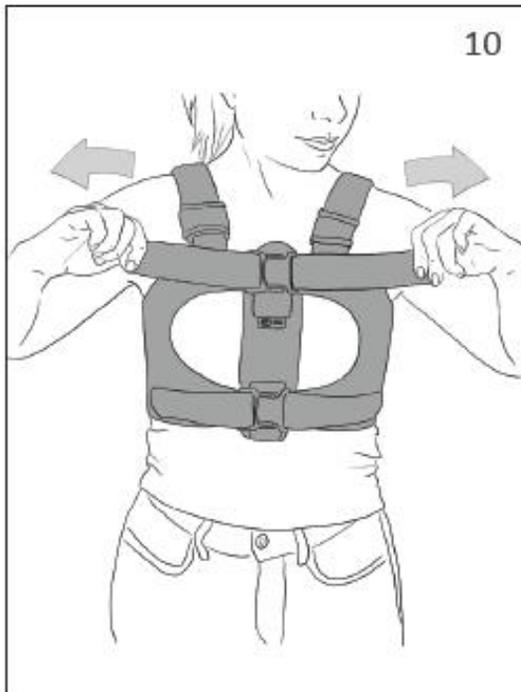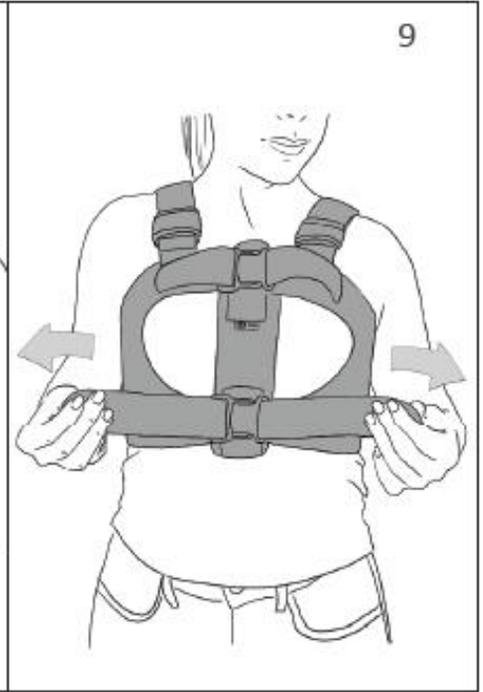

**PRIM**



53



PRIM, S.A.  
Avenida del Llano Castellano, 43  
Planta 3  
28034 Madrid  
España

